

Incrediwear Equine Anwendungshinweise

Die Produkte von Incrediwear Equine wurden entwickelt, um die Regeneration des Pferdes zu unterstützen und den natürlichen Heilungsprozess zu fördern. Die besondere Materialtechnologie basiert auf eingearbeiteten Mineralien wie Germanium und Carbon, welche durch die Körperwärme aktiviert werden.

Dadurch wird die Durchblutung unterstützt und die Sauerstoffversorgung im Gewebe gefördert. Viele Reiter nutzen Incrediwear Equine zur Unterstützung der Regeneration nach Belastung sowie bei empfindlichen oder beanspruchten Pferdebeinen.

Zusätzlich können viele Produkte im feuchten Zustand verwendet werden und erzeugen dadurch einen angenehmen Icing Effekt.

Die Produkte zeichnen sich durch hohen Tragekomfort, atmungsaktive Materialien und vielseitige Einsatzmöglichkeiten im Stallalltag aus.

Wirkungsweise

- unterstützen die Durchblutung
- fördern die Sauerstoffversorgung im Gewebe
- unterstützen die Regeneration
- können Schwellungen reduzieren
- unterstützen beanspruchte Sehnen, Bänder und Gelenke
- bieten hohen Tragekomfort
- sind atmungsaktiv und angenehm zu tragen

Die Produkte arbeiten ohne Kompression und eignen sich dadurch für viele Pferde besonders angenehm im täglichen Einsatz.

Anwendung

- Regeneration nach Training oder Turnier
- angelaufenen Beinen
- empfindlichen Sehnen und Bändern
- Schwellungen
- längeren Transporten
- Boxenruhe
- älteren Pferden
- allgemeiner Unterstützung des Bewegungsapparates

Die Incrediwear Equine Produkte können unterstützend und täglich eingesetzt werden. Die Tragedauer richtet sich nach dem jeweiligen Produkt sowie der individuellen Situation des Pferdes. Da die Produkte ohne Kompression arbeiten, eignen sie sich je nach Anwendung auch für eine langfristige beziehungsweise dauerhafte Nutzung.

Kühlender Effekt bei feuchter Anwendung

Die meisten Incrediwear Equine Produkte können zusätzlich einen kühlenden Effekt erzeugen.

Dafür:

- Produkt im trockenen Zustand anziehen
- anschliessend mit Wasser befeuchten

Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Kühlprodukten besteht dabei keine Gefahr von Unterkühlung, Frostbeulen oder Kälteschäden durch übermässige Kühlung.

Der kühlende Effekt kann die Temperatur im Gewebe innerhalb von 15 Minuten um bis zu 9,3 Grad senken.

Wichtig:

Die Circulation Standing Wraps sollten nicht im nassen Zustand verwendet werden.

Alle anderen geeigneten Incrediwear Equine Produkte können im feuchten Zustand verwendet werden und erzeugen dabei den typischen Icing Effekt.

Die Produkte sollten nicht am Pferdebein trocknen. Nach der Anwendung sollten sie ausgezogen und vollständig getrocknet werden. Bei Bedarf können sie anschliessend im trockenen Zustand erneut verwendet werden.

Produktübersicht

Circulation Hoof Socks & Hock Sleeves

Vielseitig einsetzbare Regenerationsprodukte zur Unterstützung beanspruchter Bereiche an den Pferdebeinen.

Die Hoof Socks können klassisch im Hufbereich verwendet oder zusätzlich höher hochgezogen werden, sodass sie auch im Bereich des Karpal- oder Sprunggelenks eingesetzt werden können. Die Hock Sleeves wurden speziell zur Unterstützung der gesamten Hinterbeine entwickelt – vom Fesselbereich bis zum Sprunggelenk.

Geeignet zur Unterstützung bei:

- empfindlichen Hufen
- Belastung nach Training
- Regeneration
- beanspruchten Pferdebeinen
- allgemeiner Unterstützung im Huf-, Karpal- und Sprunggelenksbereich

Empfehlung:

Produkte, die über den Huf gezogen werden wie Hoof Socks oder Sleeves, sollten idealerweise immer mithilfe eines Plastiksacks über den Huf gezogen werden. Dadurch wird verhindert, dass das Material an Nägeln, Kanten oder anderen spitzen Stellen hängen bleibt und beschädigt wird.

Circulation Standing Wraps

Bandagen zur Unterstützung der Regeneration und Durchblutung während Ruhephasen.

Geeignet für:

- Stall
- Transport
- Regeneration nach Belastung
- längere Stehzeiten

Circulation Exercise Bandages

Bandagen für die Anwendung rund um Training und Belastung.

Die Produkte können feucht verwendet werden und erzeugen dabei einen kühlenden Effekt.

Sicherheitshinweise

Die Produkte ersetzen keine tierärztliche Behandlung.

Bei:

- starken Schwellungen
- Lahmheiten
- offenen Wunden
- akuten Verletzungen
- unklaren Beschwerden

sollte immer ein Tierarzt konsultiert werden.

Pflegehinweise

- Regelmässig gemäss Herstellerangaben waschen
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden
- Vollständig trocknen lassen
- Produkte regelmässig auf Beschädigungen kontrollieren